

Milchtest - NK Test

na zjištění počtu somatických buněk v mléce



- Připraven k použití
- Snadné ovládání
- Rychlé výsledky

Vlastnosti:

Milchtest je testovací kapalina, která se nalévá do testovacích misek, pomocí nichž se zjišťuje počet somatických buněk v surovém mléce.

Oblast použití:

na zjištění počtu somatických buněk v mléce

Návod k použití:

1. První tři stříky mléka z jednotlivých struků, jako obvykle, vstříkněte do kádinky.
2. Poté odeberete vzorek mléka z jednotlivých struků přímo do testovací misky. Překlopením testovací misky se přebytečné mléko přelije až k testovací čáře.
3. Přidejte 1 střík (=2-3ml) kapaliny Milchtest (např. pomocí dávkovací pumpičky) a kroužícími pohyby testovací misky smíchejte mléko a kapalinu.
4. Po několika sekundách uvidíte výsledek → čím více se vytvoří šmouhy, tím více je zvýšen počet somatických buněk.
5. Po použití vyprázdněte testovací misku a řádně ji umyjte vodou.

Poznámky:

Výsledky si poznamenejte do kontrolního deníku, abyste problematická zvířata rozpoznali včas.

Obsažené látky:

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, barvivo

Balení:

1000 ml